

电子床头卡 产品手册_V1.0

M-BS03



● 产品概述

本产品是 M 系列无线电子床头卡，基于 LoRa 无线传输协议，用于显示患者住院信息、责任医生护士、用药情况、医嘱等入院信息。本产品配合网关可根据医院的需求灵活定义界面内容及排版。

● 功能特点

- 高档铝合金机身搭配超薄外观设计
- 无需布线，即挂即用
- 基于 LoRa 无线通讯，信号安全稳定
- 超长待机，长达 3 年或以上
- 显示内容即时更新，无需人为干预
- 后台电量集中管理

● 规格参数

工作电压：DC 3.3V

电池电容：3500mA

界面刷新电流：40mA

低功耗待机电流：120~200 μ A

显示屏：7.5"


分辨率：640 \times 384

外形尺寸(L \times W \times D)：184 \times 125 \times 9mm

环境温度：-10 $^{\circ}$ C~+55 $^{\circ}$ C


● 产品尺寸图

外形尺寸(L \times W \times D): 184 \times 125 \times 9 mm

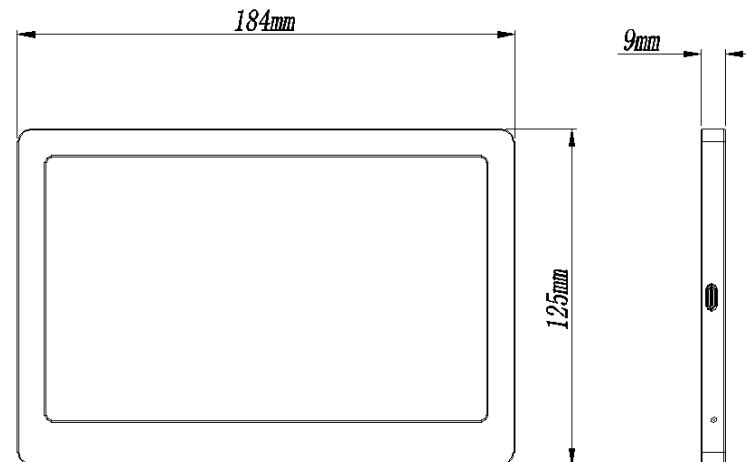

● 使用说明

外观接口说明

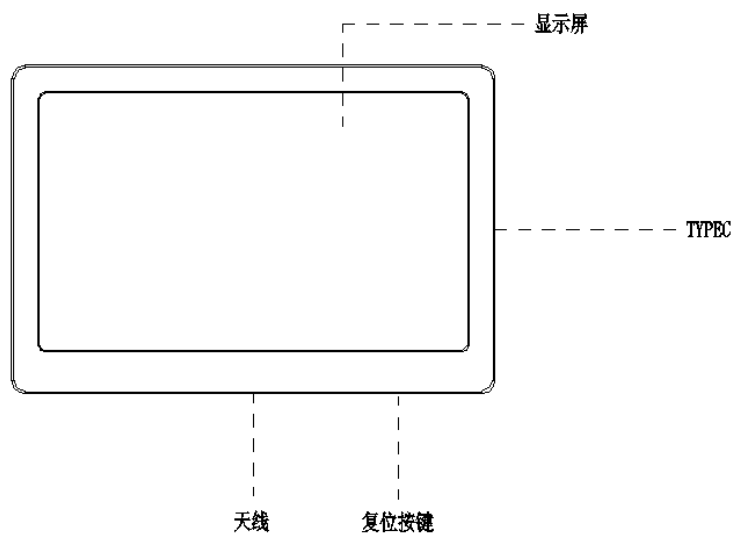

接口说明:

Type-c: 充电接口;

天线: 用于增强 LoRa 信号;

复位按键: 用于复位。

操作使用提示:

本产品需工作人员配置好电子床头卡系统。

修改患者信息:

1、医护人员在医院系统上录入、修改完患者信息;

2、电子床头卡将自动更新录入、修改的患者信息。

电池电量查看:

后台服务器可查看电子床头卡电池的使用情况。

● 安装说明

<p>①</p> <p>55mm</p> <p>55mm</p> <p>开孔大小3.0mm</p>	<p>第一步:</p> <p>在设备带上按图 1 挂墙架的开孔大小和开孔距离开孔。</p>
<p>②</p>	<p>第二步:</p> <p>用螺丝将挂墙架固定在设备带上, 然后将设备固定在挂墙架上即可完成安装。</p>
<p>③</p>	<p>第三步:</p> <p>安装完成后的状态。</p>