

使用手册

非可视床头分机



简系列数字系统_V1.0

J-BS12

目录

产品概述.....	3
功能特点.....	3
规格参数.....	3
外观及接口说明.....	4
安装说明.....	7
操作说明.....	8

产品概述

本产品是简系列的非可视床头分机, 安装于医院病房或养老院客房床头设备带或 86 盒上, 采用标准六类线连接, 基于 TCP/IP 传输协议, 支持按键呼叫、手柄呼叫、双工音频对讲、及护理处置按钮。

功能特点

- 独立紧急呼叫物理按键
- 独立护理按钮
- 数字双工通话对讲
- 支持双网口, 数字入网


规格参数

供电方式: DC12~24V 独立 供电或标准 POE 供电	独立 DC 供电接口
整机额定功率: $\leq 3W$	接入独立呼叫器接口
工作参数 待机功率: $\leq 1W$ 支持手柄呼叫 内置喇叭*1	接口 支持 RJ45 双网口 支持独立 485 拓展接口, 支持 7 防区接口

产品尺寸 (W/H/D) : 138*90*12mm


外观及接口说明

正视图

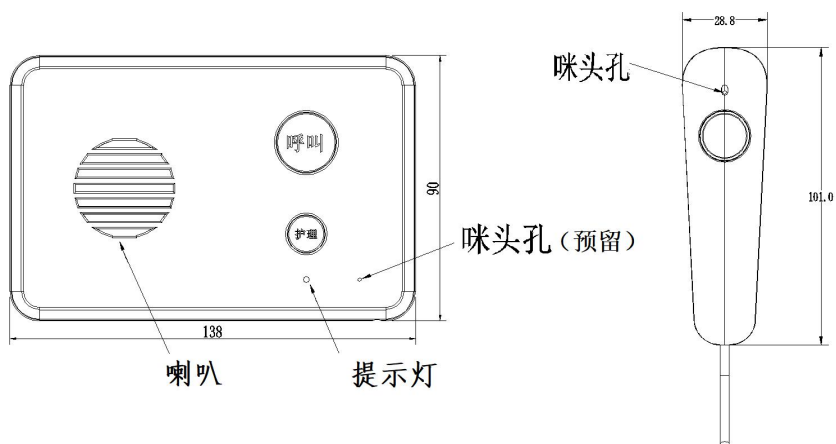

注：手柄同机身的安装距离建议 $\geq 100\text{mm}$ 。

接口说明

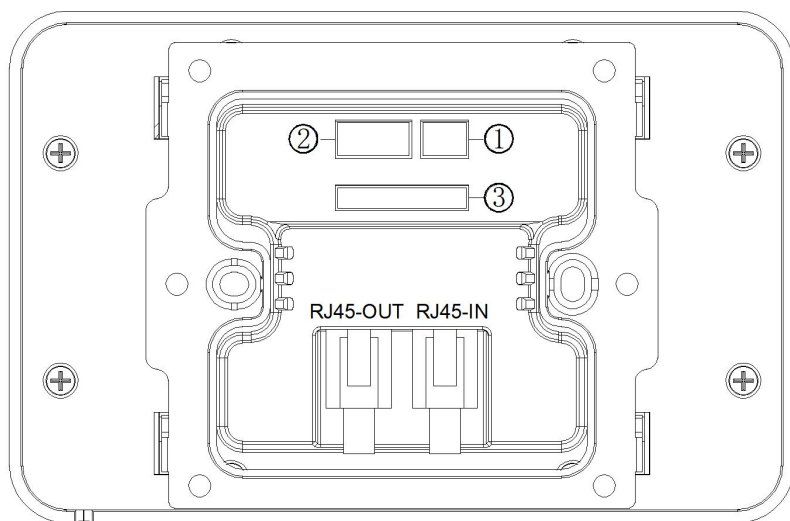

① 24V 电源输入接口

24V-

24V+

② 防区接口

GND

B

A

GND

S0

ZX

Z7

Z6

Z5

Z4

Z3

Z2

Z1

Z0

③ 物联网节点接口

+5V

TX

RX

GND

④ 手柄

GND MIC_N MIC_P KEY HAND


咪头负极 咪头正极 手柄按键

⑤ 双 RJ45 网络接口


主（入）

从（出）


安装说明

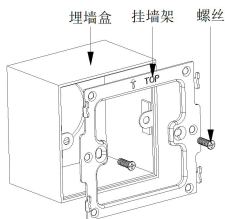

1. 安装挂墙架，用 2 个螺丝将挂墙架拧紧到埋墙盒中。

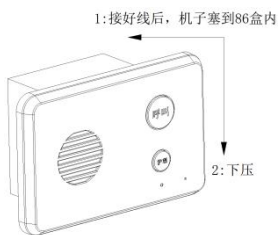

2. 取出端子，连接好线，后盖对上挂墙架上的挂钩，挂进挂墙架后，端子往下按压，听到有味一声响就是安装到位。

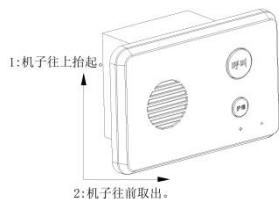

产品拆离 86 盒步骤：

1. 端子往上抬起，脱离扣位；
2. 握住端子向前用力，即可取出。

操作说明

呼叫及护理按键

- 1、当按下呼叫按键时，床头机响回铃音，提示灯显示，同时护士站管理机提醒呼叫服务，接听后可同床头机进行双向的音频对话，以便获取呼叫服务，接听后床头机提示灯熄灭，如若护士站管理机无接听，则提示灯常亮或按下护理按键后提示灯熄灭。
- 2、当按下护理按键时，仅有床头提示灯变亮提示，5S 后自动熄灭。